

NAZWA PRODUKTU

A0_tds0231b_Korektor postawy USB Intelligent

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używać urządzenia podczas snu.
- Unikać kontaktu z wodą, wilgocią oraz miejscami o podwyższonej temperaturze.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie demontować ani nie ingerować w elektronikę urządzenia.
- Podczas ładowania nie zakładać korektora na ciało
- Regularnie sprawdzać stan pasków i sensorów pod kątem uszkodzeń.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed pierwszym użyciem w pełni naładować urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB.
- Zakładać korektor na czyste, suche ciało lub cienką odzież, dopasowując paski tak, aby nie powodowały ucisku.
- Użytkować urządzenie przez maksymalnie 2–3 godziny dziennie, szczególnie w początkowej fazie stosowania.
- Po każdym użyciu oczyścić powierzchnię urządzenia suchą ściereczką.
- Stosować regularnie, najlepiej o stałych porach dnia, aby wyrobić nawyk prawidłowej postawy.
- Można nosić pod ubraniem – zadbać o wygodę i swobodę ruchu.
- Nie przeciążać urządzenia – jeśli pojawi się dyskomfort, natychmiast przerwać użytkowanie.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u dzieci poniżej 8 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przeciwwskazane w przypadku schorzeń ortopedycznych, urazów kręgosłupa, świeżych operacji, przepukliny kręgosłupa lub innych poważnych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.
- Nie używać u osób z rozrusznikiem serca lub innymi aktywnymi implantami elektronicznymi.
- Nie stosować na skórę uszkodzoną, podrażnioną lub z otwartymi ranami.
- Przerwać użytkowanie w przypadku bólu, drętwienia lub jakichkolwiek innych niepokojących objawów.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.