

## **NAZWA PRODUKTU**

**WAŁEK ROLLER REHABILITACYJNY DO MASAŻU Z WYPUSTKAMI KÓŁKA NA OSTROGĘ  
JEŹYK ( tds0914)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt przeznaczony do masażu stóp, mięśni i terapii punktów spustowych.
- Przed użyciem sprawdzić stan wałka i wypustek – nie używać, jeśli są uszkodzone lub pęknięte.
- Stosować wyłącznie na powierzchni ciała przeznaczonej do masażu.
- Zachować ostrożność przy osobach z wrażliwą skórą lub problemami krążeniowymi.
- Nie używać na otwartych ranach, siniakach lub podrażnionej skórze.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Umieścić roller na podłożu lub trzymać w dłoniach i przesuwać po masowanej powierzchni.
- Stosować lekkie do umiarkowanego nacisku – w przypadku bólu zmniejszyć siłę nacisku.
- Rolać stopy, mięśnie nóg, pleców lub przedramion w zależności od potrzeb rehabilitacyjnych.
- Regularne stosowanie może wspomóc redukcję napięcia mięśniowego i poprawę krążenia.
- Po użyciu oczyścić roller wilgotną ściereczką i przechowywać w suchym miejscu.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie stosować przy otwartych ranach, oparzeniach, siniakach lub podrażnionej skórze.
- Osoby z chorobami krążenia, osteoporozą lub cukrzycą powinny skonsultować stosowanie z lekarzem.
- Nie stosować u dzieci bez nadzoru dorosłego.
- W przypadku wystąpienia bólu lub podrażnienia natychmiast przerwać użycie.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.