

NAZWA PRODUKTU

MASKA ŻELOWA CHŁODZĄCA NA TWARZ OCZY GRZEJĄCA KOMPRES WSPOMAGA NA MIGRENĘ (tds0605)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego na twarz i okolice oczu w celach chłodzących lub rozgrzewających.
- Przed użyciem sprawdzić stan maski – nie używać, jeśli woreczek żelowy jest uszkodzony lub przecieka.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami żelu – stosować wyłącznie na skórze wokół oczu.
- Zachować ostrożność przy osobach z wrażliwą skórą, uczuleniami lub problemami dermatologicznymi.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- **Chłodzenie:** Umieścić maskę w lodówce lub zamrażarce na odpowiedni czas (zwykle 30–60 minut).
- **Grzanie:** Umieścić maskę w ciepłej wodzie (ok. 40–50 °C) na kilka minut lub zgodnie z instrukcją producenta.
- Nałożyć maskę na twarz, zamknąć oczy i rozluźnić mięśnie twarzy.
- Stosować kompres przez 10–20 minut – w razie potrzeby przerwać i zrobić przerwę.
- Po użyciu oczyścić powierzchnię maski wilgotną ściereczką i przechowywać w suchym miejscu.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na podrażnioną skórę, rany ani opuchnięcia o nieznanym przyczynie.
- Nie stosować bezpośrednio na oczy.
- Nie używać maski przegrzanej ani zamrożonej zbyt długo – ryzyko poparzenia lub odmrożenia skóry.
- Osoby z chorobami skóry lub zaburzeniami krążenia powinny skonsultować użycie z lekarzem.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.