

NAZWA PRODUKTU

OPASKA SPORTOWA STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO NA STOPE KOSTKE ROZMIAR M (tds0788m)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do stabilizacji stawu skokowego.
- ☐ Nie zakładać na otwarte rany, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
- ☐ Nie zaciskać zbyt mocno – nadmierny ucisk może powodować zaburzenia krążenia.
- ☐ W razie bólu, drętwienia, obrzęku lub zmiany koloru skóry natychmiast przerwać użytkowanie.
- ☐ Produkt nie zastępuje leczenia ani konsultacji z lekarzem w przypadku poważnych urazów.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zakładać na czystą i suchą skórę.
- ☐ Dobrać odpowiedni rozmiar (M) i prawidłowo dopasować opaskę.
- ☐ Stosować podczas aktywności fizycznej lub zgodnie z zaleceniami specjalisty.
- ☐ Regularnie sprawdzać stan skóry pod opaską podczas dłuższego noszenia.
- ☐ Czyścić zgodnie z instrukcją producenta i używać wyłącznie suchego produktu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną, podrażnioną lub zakażoną skórę.
- Nie używać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na materiały, z których wykonano produkt.
- Nie stosować przy ciężkich zaburzeniach krążenia, znacznym obrzęku limfatycznym lub ostrych stanach zapalnych bez konsultacji z lekarzem.
- Produkt nie jest przeznaczony do unieruchamiania złamań ani leczenia ciężkich urazów wymagających specjalistycznej ortezy.
- Nie używać uszkodzonego produktu ani stosować go w sposób powodujący nadmierny ucisk i zaburzenia krążenia.