

NAZWA PRODUKTU

PAS PODTRZYMUJĄCY BRZUCH CIAŻOWY DLA KOBIET W CIAŻY CZARNY (tds0061)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Używać pasa wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- ☐ Dobrać odpowiedni rozmiar i wyregulować pas tak, aby zapewniał podparcie, ale nie powodował nadmiernego ucisku brzucha.
- ☐ W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, trudności z oddychaniem lub pogorszenia samopoczucia natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Regularnie sprawdzać stan pasa – nie używać produktu uszkodzonego, przetartego lub z niesprawnymi elementami mocującymi.
- ☐ Pas nie zastępuje opieki medycznej ani zaleceń lekarza prowadzącego ciążę i powinien być stosowany zgodnie z jego wskazaniem, zwłaszcza w ciąży wysokiego ryzyka

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Stosować pas podczas chodzenia, wykonywania codziennych czynności lub dłuższego stania w celu zwiększenia komfortu i odciążenia dolnej części pleców oraz brzucha.
- ☐ Zakładać pas na cienką warstwę odzieży lub czystą, suchą skórę zgodnie z instrukcją producenta.
- ☐ Utrzymywać produkt w czystości zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji.
- ☐ Dopasowywać napięcie pasa do zmieniającego się obwodu brzucha w kolejnych etapach ciąży.
- ☐ Łączyć stosowanie pasa z odpowiednią aktywnością fizyczną zaleconą przez lekarza lub fizjoterapeutę, nie traktując go jako zamiennika pracy mięśni.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w przypadku otwartych ran, uszkodzeń skóry, oparzeń lub aktywnych zmian dermatologicznych w miejscu kontaktu pasa.
- ☐ Nie używać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na materiały, z których wykonano produkt.
- ☐ Nie stosować w razie przeciwwskazań wydanych przez lekarza prowadzącego ciążę.
- ☐ Nie używać w przypadku silnego dyskomfortu, nasilonego bólu, zaburzeń krążenia lub ucisku powodującego drętwienie kończyn.
- ☐ Nie stosować jako wyrobu leczniczego zastępującego diagnostykę, leczenie lub specjalistyczną opiekę medyczną.