

NAZWA PRODUKTU

**STABILIZATOR NADGARSTKA OPASKA UCISKOWA NADGARSTEK UNIWERSALNA LEWA I
PRAWA (tds0399)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy zapinać stabilizatora zbyt ciasno – nadmierny ucisk może powodować drętwienie, mrowienie, ból lub zaburzenia krążenia.
- Podczas użytkowania należy regularnie kontrolować stan skóry w miejscu przylegania opaski, szczególnie przy dłuższym noszeniu.
- W przypadku wystąpienia drętwienia, sinienia, zwiększonego bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów należy natychmiast poluzować lub zdjąć stabilizator.
- Stabilizator należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i nie używać go jako zamiennika leczenia zaleconego przez lekarza.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan produktu, napięcia oraz materiału. Nie należy używać uszkodzonego lub nadmiernie zużytego stabilizatora.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed założeniem należy upewnić się, że dłoń i nadgarstek są czyste i suche.
- Umieścić pętlę stabilizatora na kciuku, a następnie owinąć opaskę wokół nadgarstka zgodnie z jej konstrukcją.
- Dopasować napięcie opaski tak, aby zapewniała stabilizację i komfort, bez nadmiernego ucisku.
- Zapiąć stabilizator za pomocą rzepu i sprawdzić, czy palce zachowują swobodę ruchu oraz czy nie występują zaburzenia czucia.
- Po użyciu należy zdjąć stabilizator i pozostawić skórę do odpoczynku. Produkt należy utrzymywać w czystości i prać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego pielęgnacji.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, uszkodzoną lub silnie podrażnioną skórę.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub nadwrażliwości na materiały, z których wykonany jest produkt.
- Nie stosować w przypadku ostrego stanu zapalnego, infekcji lub innych zmian skórnych w miejscu zakładania, bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.
- Nie stosować w przypadku urazów wymagających pełnego unieruchomienia nadgarstka, jeśli takie unieruchomienie nie jest zapewnione przez ten produkt.
- W przypadku wystąpienia bólu, zaburzeń czucia, silnego obrzęku lub zmiany zabarwienia dłoni podczas stosowania należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.